

Dentapreg™ Large Restoration | Große Restaurationen

English

Deutsch


1) Prepare the tooth. Ensure dry working area (rubberdam).

1) Präparieren Sie den Zahn. Stellen Sie (durch einen Kofferdam) ein trockenes Arbeitsfeld sicher.




2) Apply etching gel and subsequently adhesive system to the surface of prepared tooth, light cure it.*

2) Applizieren Sie das Etch-Gel und das Adhäsivsystem auf den präparierten Zahn und härten Sie aus.*

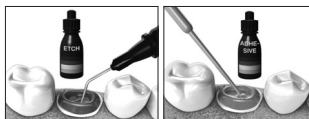


3) Begin the reconstruction of the tooth.

3) Beginnen Sie mit der Zahnrestauration.

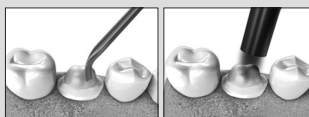

4) Measure the required length of Dentapreg™ strip.**

4) Messen Sie die erforderliche Länge des Dentapreg™ - Streifens ab.**

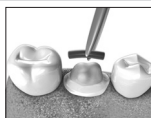


5) Apply layer of flow composite on the surface of reconstructed tooth.

5) Tragen Sie eine dünne Flow-Kompositischicht auf den bereits wiederhergestellten Zahn auf.




6) Remove the strip from the blister and cut it with scissors to required length.***

6) Nehmen Sie den Streifen aus dem Blister und schneiden Sie ihn mit einer Schere auf die erforderliche Länge.***

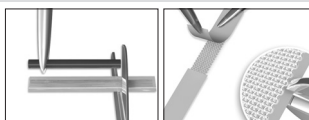

7) Insert and adapt the strip to flow composite.

7) Platzieren und adaptieren Sie den Dentapreg™ - Streifen im Flow-Kompositischicht.

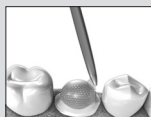


8) Light cure the strip for 40 seconds.

8) Härten Sie den Dentapreg™ - Streifen für die Dauer von 40 Sekunden aus.



9) Finish the reconstruction of the tooth with C&B composite.**


9) Vollenden Sie die Zahnrestauration und verwenden Sie dabei entsprechendes C&B-Komposit.**

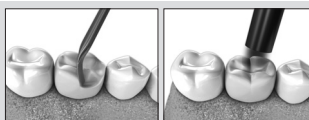

* Follow the manufacturer instructions. Beachten Sie die Empfehlung des Herstellers.

** Use dental wax, wedjets, dental floss etc. Zum Abmessen der erforderlichen Streifenlänge benutzt man Dentalwachs, Wedjets, Zahnseide usw.

*** Protect the rest of the strip against the light. Schützen Sie den nicht verbrauchten Streifen vor Licht.

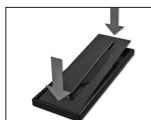

Dentapreg™ Velké výplně | Grande restaurazione

Česky

Italiano


1) Napreparujte zub. Zajistěte suché pracovní pole (rubberdam).

1) Preparare il dente. Assicurare un campo d'azione asciutto (utilizzando una diga di gomma).




2) Aplikujte na povrch preparovaného zubu etching gel a následně adhezivní systém, vytvrďte ho.*

2) Applicare uno strato sottile di gel mordenzante e del sistema adesivo sul dente preparato.*

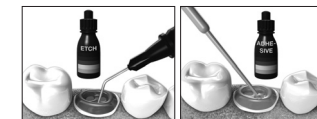

3) Začněte dostavbu zubu.

3) Procedere con il restauro del dente.

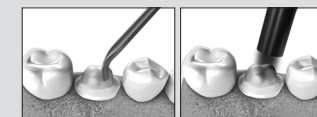

4) Změřte požadovanou délku pásku Dentapreg™.**

4) Misurare la lunghezza desiderata della striscia Dentapreg™.**




5) Aplikujte vrstvu flow kompozitu na povrch rekonstruovaného zubu.

5) Applicare uno strato sottile di composito fluido mentre si procede con il restauro.



6) Vyjměte pásek z blistru a uštrihněte ho na požadovanou délku.***

6) Estrarre la striscia dal blister e tagliarla la lunghezza desiderata.***

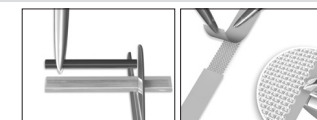

7) Umístěte a adaptujte pásek do flow kompozitu.

7) Porre e adattare la striscia nel composito fluido.




8) Vytvrďte pásek po dobu 40 sekund.

8) Fotoindurre la striscia adattata per 40 secondi.



9) Dokončete výstavbu zubu s využitím C&B kompozitu.**

9) Finire il restauro usando il composito C&B.**

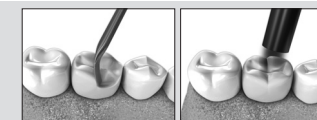

* Postupujte dle doporučení výrobce. Secondo le istruzioni del produttore.

** K měření délky pásku je možné použít dentální vosk, wedjets, zubní nit atd. Per misurare la lunghezza della striscia, utilizzare la cera dentaria, i cunei o il filo dentario ecc.

*** Nepoužitou část pásku chraňte před světlem. Proteggere la parte non utilizzata dalla luce.

